


Compruebe si hay signos de paro cardíaco repentino:
☑ no responde ☑ no respira normalmente



GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA


INSTRUCCIONES DETALLADA

Para iniciar: tire del mango.
Quite la cubierta de protección.

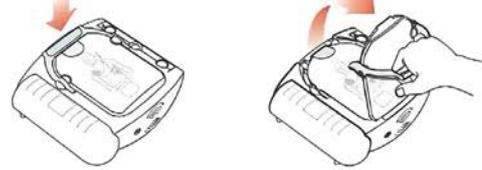


1

Retire la ropa que cubre el pecho del paciente.
Si es preciso, lave y seque la piel.

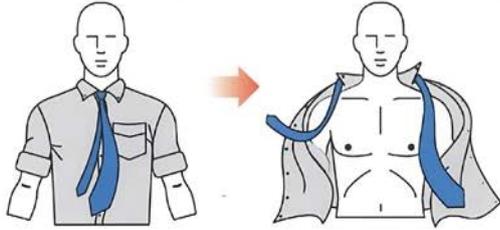


2

Despegue la película de sellado
y extraiga los electrodos del cartucho.

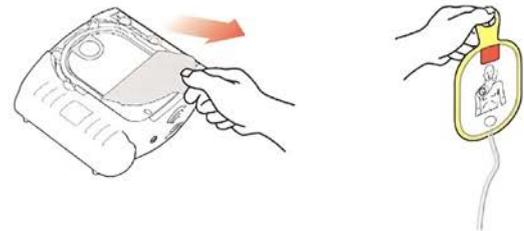


3

Despegue los electrodos de la funda de plástico amarilla.

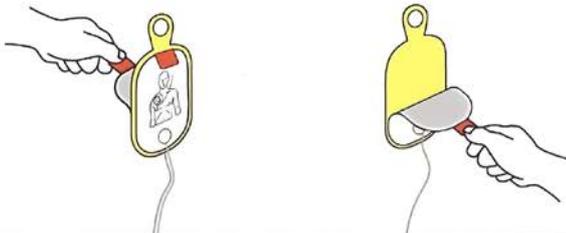

4

Colóque los electrodos exactamente como
se muestra en la ilustración.

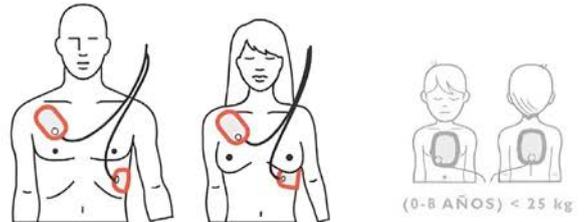


5

Analizando ... ¡No tocar al paciente!




6

Para aplicar una descarga: pulse el botón **NARANJA**
destellante de descarga. No tocar al paciente.

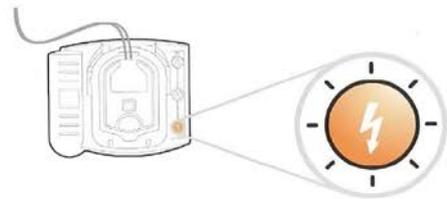

7


Para obtener ayuda con la RCP:
presione el botón **AZUL** parpadeante.

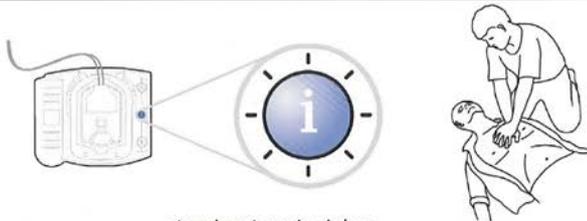

30 compresiones • cierre la nariz con los dedos y incline la cabeza hacia atrás • 2 respiraciones completas

8

Para reemplazar el cartucho: deslice el pestillo.

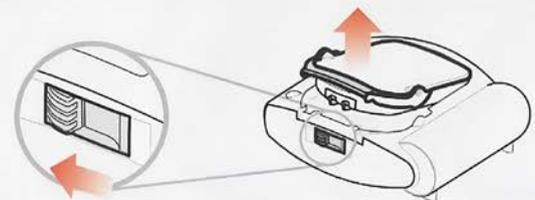

Inconsciente con respiración ausente o anormal

```
graph TD; A[Inconsciente con respiración ausente o anormal] --> B[Llame al Servicio de Emergencias]; B --> C[Dé 30 compresiones torácicas]; C --> D[Dé 2 ventilaciones de rescate]; D --> E[Continúe RCP 30:2]; E --> F[En cuanto llegue el DEA, enciéndalo y siga sus instrucciones];
```

Llame al Servicio de Emergencias

Dé 30 compresiones torácicas

Dé 2 ventilaciones de rescate

Continúe RCP 30:2

En cuanto llegue el DEA, enciéndalo y siga sus instrucciones