

Ficha Revisión DESA



Nº DESA

MES

ANO

Diaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Indicador batería	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suministros auxiliares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Semanal																															
Limpeza e danos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Estado dos repostos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mensual																															
Caducidade dos parches	Parche do DESA:																														
	Parche de reposo:																														
Responsable																															

Observacións



DOTACIÓN DA VITRINA

- Desfibrilador Semiautomático (DESA).
- Estoxo con texoiras e "Folla de datos DESA".
- Parches de reposo e rasuradora con gasas.
- Algoritmo do DESA e guía de uso rápido.

DOTACIÓN DO MALETÍN

- 3 cánulas orofarinxeas.
- Bolsa autohinchable con 2 mascarillas.
- Manta térmica.
- Pinza tiralenguas.

MANTEMENTO DO DESA (Cubrir a ficha de revisión do desfibrilador)

- **INSPECCIÓN DIARIA:** Comprobar que o indicador de batería (luz verde) parpadea e que o maletín e os suministros da vitrina están no seu sitio
 - **INSPECCIÓN SEMANAL:** Sacar o desfibrilador do estoxo e abrir o maletín para comprobar que está todo o material e non presenta danos.
 - **INSPECCIÓN MENSUAL:** Comprobar a caducidade dos parches instalados no DESA e dos de reposto.
 - **OBSERVACIONES:** Para anotar incidencias tales como danos no material, indicar a persoa que realiza a revisión por vacacións/baixa do responsable... No caso de dano ou avaría pónase en contacto co Servizo de Vixilancia da Saúde.
-
- **En caso de usar o DESA** é importante non retirar nunca a batería e comunicalo con carácter de urxencia ao Servizo de Vixilancia da Saúde. Tamén terase que cubrir a “Folla de datos DESA” do 061.
 - **Autocomprobación:** O desfibrilador leva a cabo probas de autocomprobación tódolos días de madrugada. Se a luz verde esta intermitente, significa que o desfibrilador superou a autocomprobación (mentres realiza a autocomprobación a luz é continua).
 - **Algoritmo e guía do DESA:** Dentro da vitrina encontrarase unha folla coas instrucións para a guía do socorrista en caso de necesidade. Consta do “Algoritmo do DESA” e a “Guía de referencia rápida”. Deberá asegurarse que a folla permaneza en bo estado.
 - **Batería:** O desfibrilador dispón dunha batería para o seu funcionamento cunha durabilidade de aproximadamente 5 anos. É o propio desfibrilador quen avisará cando teñamos que substituíla, nese caso terá que avisar o Servizo de Vixilancia da Saúde.
 - **Eléctrodos:** O desfibrilador ten uns eléctrodos instalados e outros de reposto dentro da vitrina. Deben substituírse os eléctrodos en caso de uso ou caducidade. No caso de caducidade dos parches do desfibrilador, cambiaranse polos de reposto e avisarase ao Servizo de Vixilancia da Saúde para repoñelos.